

非接触型据え置き電子温度計





ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。 この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。 ー.インターネット接続

本体が複数台あるときは、必ず1台ずつ順番に接続設定を行ってください。接続設定する際は他の本体の電源はOFFにしてください。

接続手順

①温度計の電源が OFF 状態になっていることを確認します。

②スマートフォンの設定画面を開き、Wi-Fiの設定画面に入ります。

9	IDにログイン クラウド、AppGalleryなどにア できます	クセス 〉
	Wi-Fi	オフ 〉
*	Bluetooth	オフ >

③温度計の電源を ON にしてからスマートフォン Wi-Fi 設定画面で「Connect Me」というホットスポットに接続してください。



④接続すると自動的に「ConnectMe」のログイン画面が表示されますので、「Configure WiFi」ボタンを押して接続させたい
Wi-Fi ルーターの SSID とパスワードを入力てください。

← ConnectMe にログイン 192.168.4.25	:	اد. ۵	← Conr 192.1	n ectMe にログイン 68.4.25	:
	Tokitest	li. 4			
ConnectMe	SSID Tokitest		Saving C	redentials	
WiFiManager	Password		If it fails	reconnect to AP to try again	
Configure WiFi	******				
Info	Save				
Exit	Refrest	ı			

⑤正しく設定されると温度計は自動的に Wi-Fi に接続されます。表示画面に Wi-Fi マークが表示されます。



*ご不明な点等ございましたら、デモ動画をご覧ください。

二.初期設定

1) 新規アカウント作成&ログイン



①アプリを開けて、ログイン画面に入ります。 ②ログインボタンの下左側の「新規アカウント作成」をクリックします。 ③メールアドレスを入力して「確認コードを送信」ボタンを押します。認証メールを確 認出来たら、中に記載している6桁の確認コードを「確認コード」欄に入力します。

メールアドレス| メールアドレスを入力してください

確認コードを送信 確認コード 確認コードを入力してください

パスワード パスワードを入力してください

パスワード(確認用)| パスワードを再入力してください

確認コードのメールが届かない場合

ユーザー規約とプライバシーポリシーにつ ▶ いての内容を確認と同意しました

④一番下のユーザー規約とプライバシー ポリシーの内容を確認して、チェックボック スにマークつけてください。

⑤新規アカウント作成画面でユーザー ID とパスワードを入力して、「この内容で登録 する」ボタンを押して登録完成となります。

⑥登録完成したら、ログイン画面へ戻って ユーザー ID とパスワードを入力してログ インできます。

2) パスワードを忘れた、または変更する場合



■ ログイン画面

を再設定画面に入ります。 ②再設定画面に会員 ID で登録したメールアドレスを入力して、「確認コードを送信」 ボタンを押します。 ③メールアドレスに届いた確認コードを入力して、「次へ」ボタンを押します。 ④パスワードを再設定して、登録ボタンを押して再設定完了します。 < パスワードを忘れた場合 パスワードを忘れた場合 < メールアドレス 新パスワード メールアドレスを入力してください 新パスワードを入力してください 確認コード 確認コードを送信 パスワード(確認用) 確認コードを入力してください パスワードを再入力してください 確認コードのメールが届かない場合 ■ 確認コードを入力画面 ■ 新パスワードを再設定画面

三.デバイス追加



①メイン画面に入って、「デバイス+」ボタンを押します。

②「デバイスを追加」のページでデバイス名と SN 番号 を入力してください。デバイス名はお客様が自由に設定 できます。

<	デバイスを追加
デバ- デバイ	イス名 「ス名を入力してください
SN番	号 QRをスキャン
SN番节	身を人力してくたさい
	送信

■ ログイン画面

③SN 番号はキーボード入力と、機器 本体裏面にある QR コードをスキャン して入力できます。 ④入力完了したら送信ボタンを押し ます。 ⑤正しく設定できると自動的にメイン画面に戻って、追加したデバイスの情報が表示されます。



 \triangleleft \bigcirc \Box

<	デバイスを追加
	デバノフター
	ナハイス名 test
	SN番号 QRをスキャン 8CCE4ED2AD78
	送信



四. 各機能紹介

1)カレンダー機能&記録検索



①デバイスの詳細画面に入って、一番下に表示している日付を押すと、カレン ダー画面が開きます。

②選定した日付を押すと、対応する日の測定記録を表示します。

③「正常測定記録」と「異常測定記録」を押して、測定記録を切り替えて表示できます。

< 室温:21.6℃ 接続状態:接続中バ	湿度: 30% 🄅 ッテリー状態 : 📑
36.2	2°C
正常測定記録	JL 異常測定記録
€ 35.9℃	2021-01-07 17:33:02
36.4℃ 36.4℃	2021-01-07 17:32:52
37.0℃	2021-01-07 17:32:49
35.6℃ 35.6℃	2021-01-07 17:32:47
€ 34.6℃	2021-01-07 17:30:59
36.3°C	2021-01-07 17:30:43
€ 35.4°C	2021-01-07 17:30:39
€ 35.8℃	2021-01-07 17:30:36
36.3°C	2021-01-07 17:30:21

■ 正常測定記録

< 室温:21.6℃ 湿度:30% 接続状態:接続中 バッテリー状態: □ 36.2 °C		
正常測定記録	異常測定記録	
€ 39.6℃	2021-01-07 17:32:56	
38.7℃ 38.7℃	2021-01-07 17:30:17	
39.9°C	2021-01-07 17:29:58	
39.9℃ 39.9℃	2021-01-07 17:29:32	
39.5℃ 39.5℃	2021-01-07 17:29:28	
39.8℃ 39.8℃	2021-01-07 17:29:23	
37.9℃ 37.9℃	2021-01-07 17:29:19	
€ 39.9℃	2021-01-07 17:29:03	
3 9.5℃	2021-01-07 17:29:28	

■ 異常測定記録

2) 音声ガイドの設定



<	設定
アラーム値	37.30
正常です	
いらっしゃいませ	
おはようございます	
こんにちは	
ご協力ありがとうご	ざいました
ご来店、ありがとう	ございます
ご来社、ありがとう	ございます
お疲れ様でした	
さようなら、気を付	けてお帰りください
お帰りなさい	
行ってらっしゃいま	せ
ありがとうございま	す、そのままお進みくださ
ご協力ありがとうご	ざいました、そのままお進

1)デバイス詳細画面に入って、右上の {○} 設定を押してデバイスの設定 画面を開くと、音声ガイド設定があり ます。

2)「温度正常音声」と「温度異常音声」 の表示枠を押すと、音声の選択肢が表示されますので、選択します。

3) マナーモードのボタンを押すと機器 は完全静音となります。

4)「送信」ボタンを押すと音声ガイドの 設定が完了します。

■ 音声ガイド設定画面

五.デバイス削除&ログアウト

1) ログアウト



①メイン画面に入って、右上のログアウトボタンを押します。

②次の選択画面で「確定」を押してログアウトします。



2) デバイスを削除 設定ボタン ①デバイス詳細画面に入って、右上の設定ボタン < 室温:21.6℃ 湿度: 30% 💽 設定 接続状態:接続中 バッテリー状態: を押します。 37.30 アラーム値 ②設定画面の一番下に「デバイスを削除」 ボタン を押します。 温度正常音声 正常です test ③次の選択画面で「確定」を押してデバイスを削 正常測定記録 異常測定記録 温度異常音声 異常です -除します。 **∫**° 35.9℃ 2021-01-07 17:33:02 マナーモード **∫**° 36.4℃ 2021-01-07 17:32:52 **37.0℃** 2021-01-07 17:32:49 **]** 35.6℃ 2021-01-07 17:32:47 **∫**° 34.6℃ 2021-01-07 17:30:59 デバイスを削除しますか? **∫** 36.3℃ 2021-01-07 17:30:43 **∫**° 35.4℃ 2021-01-07 17:30:39 キャンセル **∫**° 35.8℃ 2021-01-07 17:30:36 **∫**^C 36.3℃ 2021-01-07 17:30:21 **₽°** 36.4℃ 0001 01 07 17:00-54 デバイスを削除 2021-01-07

■ デバイス詳細画面

■ 音声ガイド設定画面